

# HARTMANN



## Bacillol® AF

**Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel mit breiter Wirksamkeit und rückstandsfreier Auftrocknung.**



CE 0482

### Anwendungsgebiete

Bacillol® AF ist ein alkoholbasiertes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur rückstandsfreien Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten. In Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit und eine rückstandsfreie Auftrocknung notwendig ist, sowie im Lebensmittelbereich und in sensiblen produktberührenden Bereichen.

### Wirksamkeit

Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

### Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertige Lösung
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Schnell und breit wirksam
- Rückstandsfreie Auftrocknung
- Gute Benetzung
- Ohne Handschuhe verwendbar\*

| Wirksamkeit                                   | Prüfmethode                                                                 | Belastung                    | Einwirkzeit |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Bakterien / Pilze</b>                      |                                                                             |                              |             |
| Bakterizidie / Levurozidie                    | VAH                                                                         | hoch                         | 1 Min.      |
|                                               | EN 13727 / EN 13624 / EN 16615                                              | hoch                         | 30 Sek.     |
| Tuberkulozidie                                | VAH / EN 14348 / EN 16615                                                   | hoch                         | 1 Min.      |
| Mykobakterizidie                              | VAH / EN 14348 / EN 16615                                                   | hoch                         | 1 Min.      |
| Fungizidie                                    | VAH / EN 13624 / EN 16615                                                   | hoch                         | 5 Min.      |
| <b>Viren</b>                                  |                                                                             |                              |             |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)     | DVV / RKI                                                                   |                              | 15 Sek.     |
|                                               | EN 14476 / EN 16777                                                         | hoch                         | 1 Min.      |
| Begrenzt viruzid PLUS                         | DVV / RKI                                                                   |                              | 1 Min.      |
|                                               | EN 14476 / EN 16777                                                         | hoch                         | 5 Min.      |
| Norovirus                                     | EN 14476 / EN 16777                                                         | hoch                         | 3 Min.      |
| <b>RKI-Listung</b>                            |                                                                             |                              |             |
| Mittel zur Flächendesinfektion nach § 18 IfSG | Bereich A – vegetative Bakterien inkl. Mykobakterien, Pilzen und Pilzsporen |                              | 15 Min.     |
| <b>Lebensmittel / Industrie</b>               |                                                                             |                              |             |
| Bakterizidie/Levurozidie                      | EN 13697 / EN 1276/ EN 1650                                                 | hoch (4 °C, 10 °C und 20 °C) | 1 Min.      |

\* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

# Bacillo® AF



## Anwendung

Bacillo® AF eignet sich zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im Sprüh-/ Wischverfahren, bei der nicht nur eine schnelle Wirkung, sondern auch ein rückstandsfreies Auftrocknen gefordert ist.

Bacillo® AF wird direkt auf die Fläche aufgebracht, sodass diese ausreichend benetzt wird. Anschließend das Produkt mit einem Tuch verteilen und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

Für Acrylglas (PMMA) sowie alkohol-empfindliche Lacke nicht einsetzbar. Bei empfindlichen Flächen Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle vornehmen.

## Hinweis

Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Die ausgebrachte Menge der Gebrauchslösung darf 50 ml je m<sup>2</sup> zu behandelnde Fläche nicht überschreiten. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml je m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Mit der Desinfektion darf nur begonnen werden, wenn keine brennbaren Dämpfe oder Gase (z.B. Benzin, Äther) im Raum vorhanden sind. Kann die elektrische Anlage nicht vollständig spannungslos

gemacht werden, ist dafür zu sorgen, dass keine Schaltvorgänge insbesondere automatische, auftreten können. Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Heiße Flächen müssen genügend abgekühlt sein. Während des Ausbringens ist die Lüftungsanlage (Klimaanlage) in Betrieb zu halten oder anders für Lüftung zu sorgen. Nicht unverdünnt in die Gewässer gelangen lassen.

## Haltbarkeit nach Anbruch

12 Monate

## Zusammensetzung

Wirkstoffe: Propan-1-ol 450 mg/g;  
Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47 mg/g

## Listung

VAH, RKI-Liste, IHO-Desinfektionsmittel-liste

## Chemisch-physikalische Daten

Flammpunkt (DIN 51755) 25 °C  
Dichte (20 °C) ca. 0,86 g/cm<sup>3</sup>

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

| Produktname        | Packungsinhalt   | Artikelnummer | PZN      | Versand-Einh.<br>Packungen |
|--------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------|
| <b>Bacillo® AF</b> | 500 ml Flasche   | 980 214       | 00182662 | 20                         |
|                    | 1000 ml Flasche  | 980 212       | 00182679 | 10                         |
|                    | 5 Liter Kanister | 980 217       | 00182685 | 1                          |

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE